

Gebruiksaanwijzing voor SILENUM gehoorbescherming

SILENUM is een oordopje om meerdere malen te gebruiken, in maat M en kan met of zonder halssnoer geruikt worden. Oordopjes worden gebruikt wanneer het geluidsniveau 85 dB(A) bereikt of overschrijdt.

Gebruik

Zorg ervoor dat de oordopjes in de juiste maat de goede pasvorm kunnen garanderen. Plaats de oordopjes door lichtjes te draaien diep in het oorkanaal en trek daarbij de oorschelp (met de tegenovergestelde hand over het hoofd heen) een beetje naar boven zodat de gehoorgang rechter wordt. Wanneer de oordopje na het plaatsen niet goed in de gehoorgang zit en de geluidsbron nog te luid is zodat het dempen niet gegarandeerd is, gebruik dan een ander model van gehoorbescherming of een andere soort gehoorbescherming.

Bewaren - opslaan - verwijdering

Bewaar de oordopjes voor en na gebruik schoongemaakt in de meegeleverde verpakking. Zorg ervoor dat de oordopjes op een droge locatie staan (maximaal bij kamertemperatuur) en niet aan zonlicht wordt blootgesteld. Als het materiaal verhard raakt, kan de bescherming niet meer worden gegarandeerd. Gooi de oordopjes in een afvalcontainer.

Schoonmaak

Was de oordopjes na gebruik met warm water en milde zeep en steek ze daarna afgedroogd weer terug in de verpakking. De oordopjes kunnen lijden onder de invloed van bepaalde chemicaliën. Meer informatie daarover kan bij de fabrikant worden aangevraagd.

Toepassing

De oordopjes zijn uitsluitend geschikt voor het beschermen van het gehoor en mogen alleen in de gehoorgang ingebracht worden. Er mogen geen mechanische wijzigingen aan het oordopje uitgevoerd worden. Voor het gebruik van de oordopjes - die meerdere keren te gebruiken zijn - moet gecontroleerd worden of deze nog steeds volledig functioneel zijn (onderhoud = reiniging). De oordopjes moeten in overeenstemming met de instructies van de fabrikant geplaatst en gereinigd worden. De oordopjes moeten zonder onderbreking in de lawaaierige zone gedragen worden om de bescherming te kunnen waarborgen.

Waarschuwing

Indien zich aan de oordopjes een verbindingskabel bevindt, mogen de oordopjes niet gedragen worden wanneer het gevaar bestaat dat de verbindingskabel tijdens het dragen ergens kan blijven achterhangen of meegetrokken wordt. Wanneer de bovenstaande instructies niet juist worden opgevolgd, kunnen de bescherming en het functioneren van de oordopjes drastisch verminderen. Dit kan voor de gebruiker mogelijk gevolgen hebben waarvoor Audio Protect AG niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Audio Protect AG garandeert niet dat elke vorm van waarschuwingssignalen en communicatie kan worden gehoord en gezien.

Frequentie Hz	Geluidsdemping	Standaard-afwijking/dB	APV - Mf - sf dB	Frequentie Hz	Geluidsdemping	Standaard-afwijking/dB	APV - Mf - sf dB
63	23.5	4.9	18.6	125	23.5	3.6	19.9
250	21.6	4.1	17.5	500	21.7	3.0	18.7
1000	23.6	3.3	20.3	2000	27.3	4.2	23.1
4000	24.9	3.9	21.0	8000	20.3	3.1	17.2
SNR = 22 dB		H = 21 dB		M = 20 dB		L = 19 dB	

Het oordopje voldoet aan de bepalingen van de verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (EU)2016/425 en werd getest conform EN352-2:2002 (DIN EN352-2:2003). U vindt testcertificaten en conformiteitsverklaringen op: www.earline.ch

Producent: JRENUM Gehörschutz AG - Freie Strasse 20 - 4001 Basel - Schweiz - www.jrenum.com

Notified Body: PZT GmbH - An der Junkerei 48F - 26389 Wilhelmshaven - Deutschland - Nr. 1974

