

Instruções de utilização - Proteção auditiva EasyPlug

EasyPlug são tampões auditivos descartáveis no tamanho M, que podem ser utilizados com ou sem fita de pescoço. Os tampões auditivos destinam-se a ser utilizados quando o nível de ruído atinge ou ultrapassa os 85dB(A). A proteção auditiva é colocada no ouvido e, caso seja utilizada corretamente, protege o ouvido do ruído nocivo. Qualquer outra utilização é considerada indevida e, portanto, não permitida.

Uso

Certifique-se que o tamanho dos tampões auditivos garante a sua fixação correta. O tampão deve ser enrolado entre dois dedos, o que o torna mais fino e aquece-o simultaneamente. Assim, pode adaptar-se ao canal auditivo e vedá-lo após a introdução. Coloque o tampão auditivo no canal auditivo enquanto puxa a orelha (por cima da cabeça, com a mão oposta) ligeiramente para cima, de modo a que o canal auditivo fique direito. Após colocar o tampão auditivo, solte a orelha e pressione o tampão até que este se tenha expandido completamente no canal auditivo e o vede completamente. Se o tampão auditivo não assentar bem no canal auditivo após a sua introdução e o ruído ainda for demasiado alto, não garantindo o isolamento, utilize um outro modelo do tampão auditivo ou um outro tipo de proteção auditiva.

Conservação, Armazenamento, Eliminação

Antes da utilização, conserve os tampões auditivos limpos dentro da embalagem. Certifique-se que estes são colocados num local seco (no máximo, à temperatura ambiente) e que não ficam expostos à luz solar. Se sentir que o material está mais rijo, já não é possível garantir a proteção. Elimine-os junto com os resíduos domésticos.

Aplicação

Os tampões auditivos foram concebidos exclusivamente como proteção auditiva e devem ser introduzidos apenas no canal auditivo. Os tampões auditivos devem ser montados em conformidade com as indicações do fabricante. Os tampões auditivos devem ser continuamente utilizados na área de ruído para ser possível garantir a proteção.

Aviso

Se os tampões auditivos possuem um cordão de ligação, eles não devem ser utilizados se existir o perigo de este ficar preso ou se partir durante o uso. Se as instruções anteriores não forem seguidas corretamente, a proteção e a funcionalidade dos tampões auditivos reduzir-se-á drasticamente. Isto pode trazer consequências para o utilizador, pelas quais a Audio Protect AG não assume qualquer responsabilidade. A Audio Protect AG não oferece qualquer garantia de se poder ouvir e perceber qualquer tipo de sinais de aviso e comunicações.

earplug size: L = 24mm Ø front = 11.5mm Ø back = 12.5mm

Frequência HZ	Isolamento sonoro	Desvios padrão/dB	APV - Mf - sf dB	Frequência HZ	Isolamento sonoro	Desvios padrão/dB	APV - Mf - sf dB
63	24.1	4.6	19.5	125	29.4	5.2	24.2
250	33.9	5.9	28.0	500	36.6	6.4	30.2
1000	35.5	5.9	29.6	2000	35.8	3.9	31.9
4000	45.1	3.6	41.5	8000	45.7	5.7	40.0
SNR = 34 dB		H = 34 dB		M = 31 dB		L = 29 dB	

CE 2777
Version 2: 20.01.2020

Os tampões auditivos cumprem os requisitos do regulamento relativo ao EPI (UE)2016/425 e foram testados conforme a norma EN 352-2:2002 (DIN EN352-2:2003) Os certificados de teste e declarações de conformidade podem ser encontrados em:

www.earline.ch/easyplug/

Produzent: Audio Protect AG - Steinhaldenstrasse 24 - 8954 Geroldswil - Schweiz - info@audioprotect.ch

Notified Body: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland



EASYPLUG